



Blocks

Instruções de uso



MII Blocks são blocos de PMMA indicados para fresagem por Sistema CAD/CAM de provisórios prótese unitária e composta, padrões de fundição e guia cirúrgico.

Instruções de uso:

Os blocos são usados conforme indicação do produto. As recomendações do fabricante do centro de usinagem e do Software devem ser seguidas.

Limites de Usinagem:

Posterior: Máximo 2 elementos fixos mais um elemento suspenso.
Espessura mínima: 0,6mm cervical e 1mm oclusal. Diâmetro mínimo de conexão: Anterior – 3,6mm; Posterior – 4,4mm.

Observações Importantes:

Durante usinagem e acabamento, evitar superaquecimento. Em usinagem sem irrigação, recomendo rotação do eixo da fresadora até 16.000rpm. Para fixação de provisórios, ao utilizar cimentos provisórios com Eugenol pode-se diminuir a eficácia de cimento resinosos. Utilizar procedimentos habituais para acabamento e polimento.

Armazenagem: Conservar ao abrigo de luz e calor.

Validade: 10 anos após a fabricação.

Composição: PMMA (Polimetilmetacrilato) e Pigmentos biocompatíveis.

